

ADE FLERGÅNGSVISIR 2.0 CE – PRODUKTBLAD (PRZ-300)

(PROFESSIONELL MODELL)

BRUKSANVISNING TILL ADE FLERGÅNGSVISIR 2.0 CE (PRZ-300)

Vänligen läs igenom denna bruksanvisning innan du använder produkten för första gången eller utför underhåll. Syftet med denna information är att bistå användaren med hjälp och riktlinjer för val och användning av personlig skyddsutrustning. Producenten är inte ansvarig för felaktig användning av personlig skyddsutrustning. Du ska behålla denna bruksanvisning så länge du använder personlig skyddsutrustning.

CE-märket innebär att ansiktsskärmen ADE Flergångsvisir 2.0 CE är personlig skyddsutrustning som överensstämmer med de väsentliga kraven i Förordning nr 2016/425 (förkortning: PPER) och har certifierats i enlighet med kraven i normen EN 166 "Personligt ögonskydd" av det anmälda organet nr 1463: Polish Register of Shipping S.A. Scientific and Research Division.

Ansiktsskärmen ADE Flergångsvisir 2.0 CE är en helt funktionell återanvändbar ansiktsskärm och är avsedd för självmontering. Materialet som rutan är tillverkad av uppfyller kraven i normen EN 166 inom ljustransmission (83%) och tillhör optisk klass nr 1.

Modellen ADE Flergångsvisir 2.0 CE är utrustad med en bekväm, 20 mm bred, flexibel tejp som kan justeras. Ansiktsskärmens ruta är rörlig och kan ställas vid valfri vinkel eller lyftas upp helt. Det finns ett signaturfält där ansiktsskärmens ägare kan skriva ner sitt namn.

Användningsändamål:

Ansiktsskärmen ADE Flergångsvisir 2.0 CE fungerar som komplettering till skyddskläder som minskar risken för smittor som sprids via droppar. Den skyddar även slemhinnor i mun, ögon och näsa mot kontakt med förorenade händer eller föremål eller små mekaniska skador. Ansiktsskärmen förhindrar att användaren reflexmässigt rör vid sitt eget ansikte.

Observera:

Ansiktsskärmen ADE Flergångsvisir 2.0 CE kan inte ersätta andra typer av personlig skyddsutrustning, i synnerhet ansiktsmasker. Ansiktsskärmen begränsar men eliminerar inte kontakt med sjukdomsframkallande mikroorganismer och utgör inte ett fullt smittskydd. Produkten har inte Folkhälsoinstitutets medicinska attester och certifikat.

Teknisk data:

- rutans mått (i liggande läge) - 300 x 230 mm - rutan är tillverkad av 0,5mm tjockt färglöst material,
- det specialutformade stabiliserings- och distanseringselementet med måtten 400 x 30 mm är tillverkat av 0,8mm tjockt plast,
- lätt och enkel konstruktion,
- återanvändbart visir,
- transporteras i liggande läge,
- visiren förpackas i skyddspåsar,

Packning:

desinficerad, i en tätsluten påse, för självmontering.

Rengöring och desinficering:

ren, minst 70% alkohol rekommenderas

Teknisk data:


Storlek: 20 x 29 cm | **Material:** PET 0,5 mm | **Fäste:** 20 mm tejp

Tradehouse Nord AB

Stenbrovägen 28
253 68 Helsingborg
Sweden
W: info@tradehouse.se

Kontaktperson

Hans Nilsson
T: 010 – 330 70 70
E: hans.nilsson@tradehouse.se

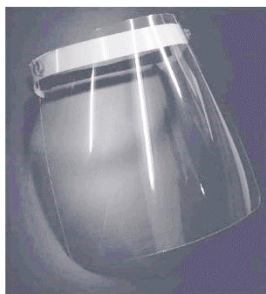


ADE FLERGÅNGSVISIR 2.0 CE – MANUAL

(PRZ-300)

(PROFESSIONELL MODELL)

Montagesätt:

- Trä bandet genom hålen i remmen och justera dess längd så att det passar huvudets storlek (enligt schemat).
- Före användning, ta först av skyddsfilmerna från bägge sidorna av ansiktsskärmens ruta.
- Fäst skärmens framsida med skruvar till pannremmen.
- Framsidans vinkel kan justeras genom att spänna på eller av muttrarna.
- Dra ansiktsskärmens ruta nedåt så att den täcker näsan och munnen.

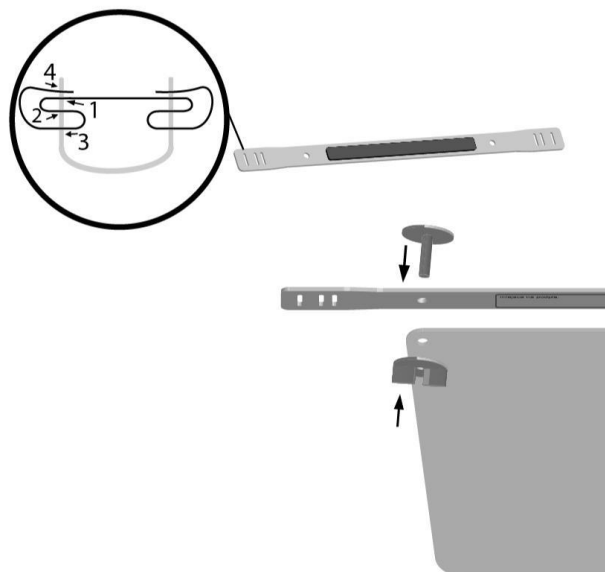

Observera:

Ansiktsskärmen ADE Flergångsvisir 2.0 CE desinficeras innan den placeras i en tätsluten förpackning.

Underhåll:

- Använd helst rengöringsmedel med minst 70% alkoholhalt.
- Användning av svampar, hårda trasor eller rengöringsmedel med granulat kan leda till att de släta ansiktsskärmensytorna blir matta och sikten försämras.
- Får inte rengöras i vatten med temperatur över 50 grader Celsius då de kan deformeras. För att avlägsna föroreningar och fetter får vätskor med hög koncentration av isopropylalkohol användas.

Användningstid:

Denna typ av produkt har ingen hållbarhetstid. Dess hållbarhetstid beror på hur användaren tar hand om den och vilka de yttre användningsvillkoren är.

Observera:

Har rutan utsatts för skador eller sprickor ska den bytas ut omedelbart.

Packning:

desinficerad, i en tätsluten påse, för självmontering.

Rengöring och desinficering:

ren, minst 70% alkohol rekommenderas

Teknisk data:

- rutans mått (i liggande läge) - 300 x 230 mm - rutan är tillverkad av 0,5mm tjockt färglöst material,
- det specialutformade stabiliserings- och distanseringsselementet med måtten 400 x 30 mm är tillverkat av 0,8mm tjockt plast,
- lätt och enkel konstruktion,
- återanvändbar visir,
- transporteras i liggande läge
- visiren förpackas i skyddspåsar,